

# 小型全自動錠剤分包機 リトリアIV

[取説@TwinRV@23JTWA1-3A.pdf \(yuyama-support.com\)](#)

## キャリブレーション実施方法

### ■ バリアブルカセット (VC)




## 準備

登録したい錠剤カプセルに必要なバリアブルカセットの種類を確認する。

(バリアブルカセット VC は薬品形状により、A・B・C+の3種類があります。)

1. キャリブレーション画面を開き、PTP シートのバーコードを読み込む。

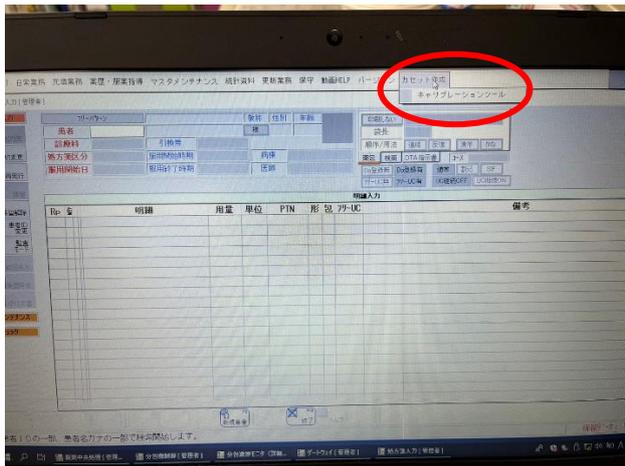

2. 必要な VC が手元に無ければユヤマに持ってきてもらう(無料)





## キャリブレーション手順


- ① キャリブレーション機器のコンセントとリトリアにつながっている黒いLANケーブルを接続する。
- ② キャリブレーション画面を開き、PTP シートのバーコードを読み込む。
- ③ VC をキャリブレーション機器へセットする。
- ④ 画面に従って操作する。
- ⑤ キャリブレーション機器操作終了。

## VC ラベル印刷


- ⑥ キャリブレーション履歴を開く

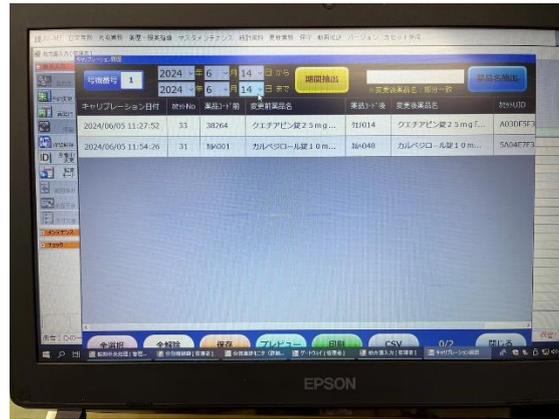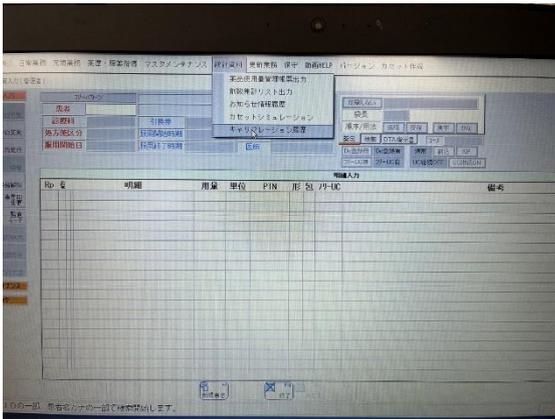

- ⑦ Shiftを押しながらすべてを選択し、保存を押し、HDPH-UT(F:)のVCラベルフォルダへ保存する。

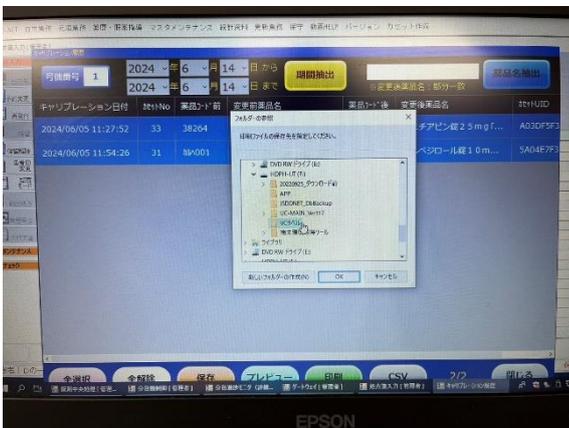


- ⑧ HDPH-UT(F:)USB をパソコンから抜き、印刷できるパソコンへ接続し、印刷する。

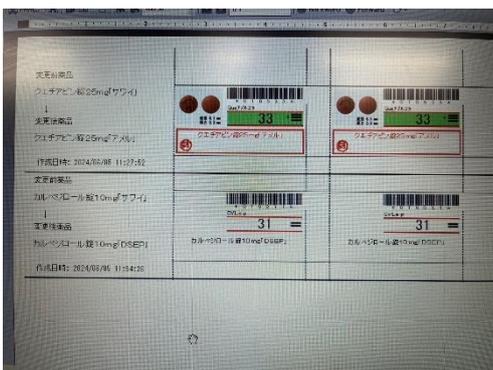

- バリアブルカセットと VC ラベルのリトリアへの登録
- ⑨ 印刷された VC ラベルをバリアブルカセットへ装着し
  - ⑩ 充てん作業を行う事でリトリアに認識される。

1. 充填業務を選択

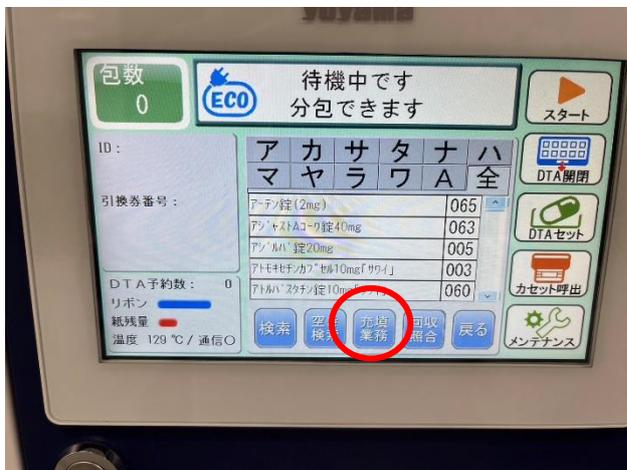

2.操作者を管理者

3.カセットを読み込む

4.VC ラベルを読み込む

5.登録完了

